



leVrai
PROFESSIONNEL

MULTI-SURFACES

BACTOPIN MÉDICAL CONCENTRÉ **

Formule désinfectante à large spectre, ultra concentrée, conforme aux protocoles d'hygiène pour la prévention contre les épidémies, idéale pour l'univers médical et les milieux sensibles.

Avantages produit

- Élimine 99,99% des germes
- Désinfecte et odorise tous types de sols et surfaces
- Flacon 1L autodoseur, pratique et ergonomique, délivre une dose de 5 à 25mL.

Mode d'emploi

Un nettoyage préalable est nécessaire. Prélever la dose à diluer selon l'activité biocide recherchée. Préparer la solution. Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillère / le balai à franges / la brosse et appliquer sur toute la surface à traiter. Laisser agir selon l'activité biocide recherchée. Convient pour la désinfection des sols ou des surfaces hautes, en préimprégnation, en seau, en autolaveuse ou en reconditionnement de flacon pulvérisateur.

Caractéristiques techniques

Aspect : liquide
Couleur : jaune
Senteur : Pin des Landes
C.O.V : 1,5 %
Masse volumique : 1,050 g/cm³
pH pur : 12,9
pH dilution : 11 / 11,5
Produit biocide (SL) : TP2 et TP4.

Composition et emballage

Désinfectant (chlorure de didécyl diméthyl ammonium CAS n° 7173-51-5 : 72,45 g/L).

Ingrédients d'origine végétale et minérale : 75,70 %

Ingrédients biodégradables : 94,8 % en 28 jours (OCDE 301)

Flacon entièrement recyclable et issu de 50 % de plastique recyclé. Bidon majoritairement recyclable.



FLACON
DOSEUR

Bidon 5L : 3807

Flacon autodoseur 1L : 3806



Contact
alimentaire
HACCP



Utilisable en
autolaveuse

Précautions d'emploi



DANGER. Peut être corrosif pour les métaux. Contient du chlorure de didécyl diméthyl ammonium et du 2-amino-éthanol. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher. **EN CAS D'INHALATION** : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** / un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** / un médecin. Éliminer le contenu / récipient par un collecteur ou un organisme agréé.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

	1 L	5 L
Code Action Pin	3806	3807
Gencod	3519220038061	3519220038078
Poids net	1,055 Kg	5,265 Kg
Poids brut	1,119 Kg	5,45 Kg
Dim. uv en mm	H. 252 x L.132 x l. 65	H. 290 x L.186 x l.127
Nb uv / carton	6	4
Palettisation	4 couches de 14 cartons soit 56 cartons (336 uv)	4 couches de 8 cartons soit 32 cartons (128 uv)

Fabriqué en France



leVrai
PROFESSIONNEL

MULTI-SURFACES

BACTOPIN MÉDICAL CONCENTRÉ **



FLACON
DOSEUR

Bidon 5L : 3807

Flacon autodoseur 1L : 3806

Propriétés microbiologiques

ACTIVITÉ	DOSES	NORMES & SOUCHES ADDITIONNELLES
BACTÉRICIDE	2 %	NF EN 13727 en 1 min en conditions de saleté médicale à 20°C
	2 %	NF EN 13697 en 5 min en conditions de saleté à 20°C
	2 %	NF EN 1276 en 1 min en conditions de saleté à 20°C
	3 %	NF EN 13697 en 5 min en conditions de saleté médicale à 20°C
	1 %	NF EN 16615 en 1 min en conditions de saleté médicale à 20°C
LEVURICIDE	2 %	NF EN 1650 en 1 min en conditions de saleté à 20°C
	2 %	NF EN 13697 en 30 min en conditions de saleté à 20°C
	4 %	NF EN 13624 en 1 min en conditions de saleté médicale à 20°C
	1 %	NF EN 13624 en 5 min en conditions de saleté médicale à 20°C
	3 %	NF EN 13697 en 5 min en conditions de saleté médicale à 20°C
	1 %	NF EN 16615 en 1 min en conditions de saleté médicale à 20°C
FONGICIDE	4 %	NF EN 1650 en 30 min en conditions de propreté à 20°C
	2 %	NF EN 16615 en 15 min en conditions de propreté à 20°C
VIRUCIDE	1 %	NF EN 14476 sur Vaccine (virus enveloppés) en 5 min en conditions de saleté médicale à 20°C
	4 %	NF EN 14476 sur Vaccine (virus enveloppés) en 1 min en conditions de propreté à 20°C
	0,5 %	NF EN 14476 sur Influenza A en 5 min en conditions de saleté médicale à 20°C
	1 %	NF EN 14476 sur Coronavirus en 1 min en conditions de propreté à 20°C
	4 %	NF EN 16777 sur Vaccine (virus enveloppés) en 1 min en conditions de propreté à 20°C
	3 %	NF EN 14476 sur Adenovirus et Norovirus Murin (couvre le Rotavirus) en 5 min en conditions de propreté à 20°C
	5 %	NF EN 16777 sur Adenovirus et Norovirus Murin (couvre le Rotavirus) en 30 min en conditions de propreté à 20°C
	5 %	NF EN 14476 sur Poliovirus en 30 min en conditions de propreté à 20°C

Virus d'intérêt couverts par l'efficacité du produit

- Coronavirus (COVID-19)
- Herpesviridae (Herpès)
- VHB (Hépatite B)
- VHC (Hépatite C)
- VHD (Hépatite DELTA)
- VIH (Immunodéficience humaine)
- HTLV (Leucémie Humaine à Cellules T)
- Virus de la grippe
- Virus de la rubéole
- Virus de la rougeole
- Virus de la rage
- Filoviridae (Fièvre Hémorragique Aigüe)
- Flavivirus (maladies transmises par les moustiques : dengue, etc.)
- Paramyxoviridae (Oreillons)
- Poxviridae (infections cutanées)

Fabriquée en France